

NITRO



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	24
Verklaring van overeenstemming.....	24
Levensduur	24
Verwijdering.....	24
Typeplaatje	24
Hergebruik.....	24
Garantie.....	24
Onderdelen van het product.....	25
Beoogd doel.....	26
Indicatie	26
Geleverd product.....	26
Veiligheidsinstructies	26
Openvouwen.....	26
Montage accessoires	27
Hoogteverstelling duwgrepen	27
Rem instellen.....	27
Remmen parkeren	27
Sitzen.....	27
Samenvouwen transporteren opbergen	28
Rugriemverstelling.....	28
Reiniging onderhoud	28
Technische gegevens.....	29

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje

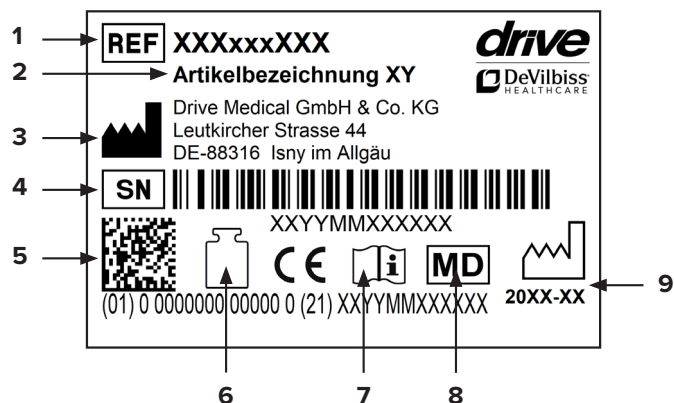

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

Onderdelen van het product



NITRO

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Handgreep | 6. Stokhouder | 11. Voorreflector |
| 2. Rem | 7. Frame | 12. Tas |
| 3. Achterreflector in greep | 8. Achterwiel | 13. Zitting |
| 4. Duwgriep | 9. Stelschroef van rem | 14. Rugriem |
| 5. Vergrendelknop voor duwgriepen | 10. Voorwiel | |

Beoogd doel

Looprekken worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Vierwielige looprekken bestaan uit een buizenframe met vier massieve rubberen wielen. Deze looprekken zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker altijd tussen de contactpunten of wielen beweegt. Deze looprekken zijn voorzien van remsystemen die vanaf de handvatten via Bowdenkabels worden bediend. Deze looprekken kunnen worden opgevouwen om transport te vergemakkelijken, en de handvatten zijn in hoogte verstelbaar.

Indicatie

INDICATIE:

Loophulp voor buiten en binnen ter ondersteuning of verbetering van beperkte mobiliteit.

De verstrekking van een loophulp aan een verzekerde moet als doel hebben de beperkte mobiliteit bij de gebruiker te compenseren of toch ten minste te verbeteren (uitbreiding van de actieradius / mobiliteit).

Voor personen met beperkingen in de hand-/armfuncties is een speciale afstelling/uitvoering van de grepen of hand-/armsteunen nodig.

Voor personen met evenwichtsstoornissen zijn verrijdbare loophulpen mogelijk niet geschikt, dit moet in afzonderlijke gevallen worden getest door te proberen. Eventueel moet een begeleider aanwezig zijn.

De rollator mag alleen bij normale, dagelijkse bezigheden gebruikt worden.

CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van de rollator wordt afgeraden bij: waarschijningsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen, onvermogen om te zitten.

Geleverd product

1 x	Rollator
1 x	Tas
1 x	Rugriem
1 x	Stokhouder
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de rollator alleen als hulpmiddel bij het lopen.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator niet als stoel in voertuigen zoals bussen of treinen!

- Het is niet toegestaan op de rollator te staan of personen of dieren op de rollator te vervoeren.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik de tas alleen voor transport van voorwerpen en belast de tas niet te zwaar! Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!
- Maak op hellende wegen gebruik van de bedrijfsrem (trek de remhendel naar boven).
- Als u te zwaar op de handgrepen leunt, kan de rollator naar achter kantelen.
- Bij het uitvouwen / samenvouwen van de rollator kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm de rollator tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsels veroorzaken.
- Vergewist u zich er voor elk gebruik van dat uw rollator in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd. Controleer of de remmen goed werken!
- Controleer voor gebruik van de rollator of de opvouwbeveiliging goed is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven op de rollator en draai deze indien nodig aan!
- De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de wielen afslijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking en de banden.
- De rollator mag NIET aan de zitting, aan afneembare onderdelen of aan de remkabels gedragen worden.
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Openvouwen




Plaats de rollator op de wielen. Druk nu de beide zijstangen van de zitting omhoog totdat deze vastklikken. De rollator is goed opgevouwen als de vergrendelhaak is vastgeklikt. **(afb. 1)**.

Montage accessoires

Vouw de rollator een beetje samen en schuif dan de schuifblokken van de tas in de geleiders links en rechts. Vouw de rollator weer open (**afb. 2**).



Hoogteverstelling duwgrepen

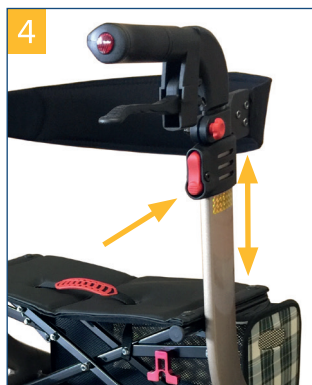



Druk aan de onderkant op de vergrendelknop voor hoogteverstelling van de duwgreep en trek de duwgreep gelijktijdig naar boven.

Zodra de duwgreep beweegt, laat u de knop los. De duwgreep wordt dan automatisch op de volgende hoogte vergrendeld.

Herhaal deze stappen totdat de gewenste hoogte is ingesteld.

Rem instellen

Als de rem slecht of juist te krachtig werkt, kan de rem met de stelschroef onder aan de bowdenkabel worden ingesteld op de gewenste remwerking. Druk daarvoor de instelhuls in de richting van het wiel (**afb. 5**) en draai de stelschroef in de gewenste richting (**afb. 6**).

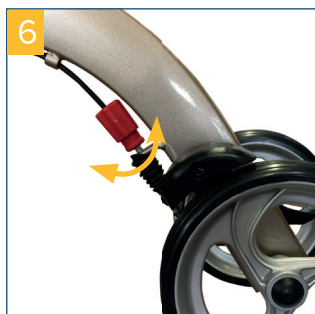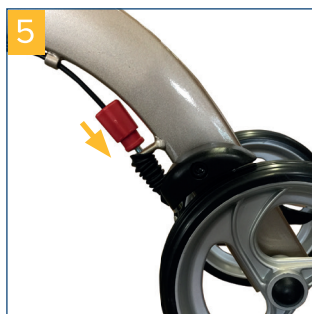

Naar rechts draaien: rem werkt lichter
Naar links draaien: rem werkt sterker

Remmen | parkeren

Als u tijdens het lopen met de rollator wilt remmen, trekt u beide remgrepen met de handen omhoog (**afb. 7**). Rem altijd langzaam en gelijkmatig met beide handen.

Als u de rollator wilt vastzetten/parkeren, drukt u beide remgrepen omlaag totdat deze hoorbaar vastklikken (**afb. 8**)!

U ontgrendelt de remmen door de beide remgrepen weer omhoog te trekken totdat deze zijn ontgrendeld (de remgrepen staan in de middelste stand).



De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de banden afslijten. Controleer daarom regelmatig of de rollator goed remt.

Sitzen



Plaats de rollator op een vlakke, stevige ondergrond. Vergrendel vervolgens de remmen. De rollator moet stabiel staan en mag niet wegglijden. Blijf rechtop zitten, leun niet naar achteren. Alleen zitten zoals in de afbeelding, met uw rug naar de looprichting, is toegestaan (**afb. 11**)!

Samenvouwen | transporteren | opbergen

Wanneer u de rollator wilt samenvouwen, trekt u de zitting aan de greep omhoog (**afb. 13**).




Daarna drukt u de rollator aan de zijkanten in elkaar tot de opvouwbeveiliging hoorbaar vastklikt (**afb. 14**).



Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60 °C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna etc.)
- Neem bij defecten contact op met de specialzaak waar u dit product hebt gekocht.
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

Rugriemverstelling

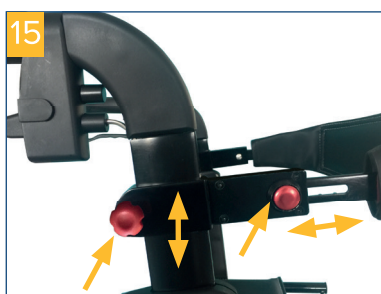

Technische gegevens

Product	NITRO maat XS	NITRO maat S	NITRO maat M	NITRO maat L
champagne	724100300	724100000	724200000	724300000
wit	-	-	724200100	724300100
zwart	-	-	724200200	-
rood	724100400	724100200	724200400	724300200

Technische gegevens				
Totale lengte x totale breedte	70,5 cm x 52 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm	70,5 cm x 61 cm
Greephoogte	71,8 - 77 cm	79 - 91 cm	84 - 96,5 cm	89 - 101 cm
Zitbreedte x zitdiepte	37 cm x 20 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm	44,5 cm x 22 cm
Zithoogte	45 cm	52 cm	57 cm	62 cm
Breedte tussen handgrepen	34,5 cm	45 cm	45 cm	45 cm
Afmetingen samengevouwen	70,5 x 25 x 71,8 cm	70,5 x 25 x 82 cm	70,5 x 25 x 86 cm	70,5 x 25 x 92 cm
Gewicht	6,7 kg	7,1 kg	7,2 kg	7,3 kg
Max. belasting	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Max. belasting tas	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg