

NITRO SL



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	19
Verklaring van overeenstemming.....	19
Levensduur	19
Verwijdering	19
Tyeplaatje.....	19
Hergebruik.....	19
Garantie	19
Onderdelen van het product.....	20
Beoogd doel.....	21
Indicatie	21
Geleverd product.....	21
Veiligheidsinstructies	21
Openvouwen.....	22
Montage accessoires.....	22
Hoogteverstelling duwgrepen	22
Rem instellen.....	22
Remmen / parkeren.....	22
Rugleuningverstelling	23
Stokhouder	23
Zitten	23
Kantelhelpmiddelen	23
Samenvouwen transporteren opbergen	23
Reiniging onderhoud	24
Technische gegevens.....	24

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

De fabrikant heeft geen toegankelijke gebruiksaanwijzing in gemakkelijke en/of eenvoudige taal beschikbaar.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Tyeplaatje

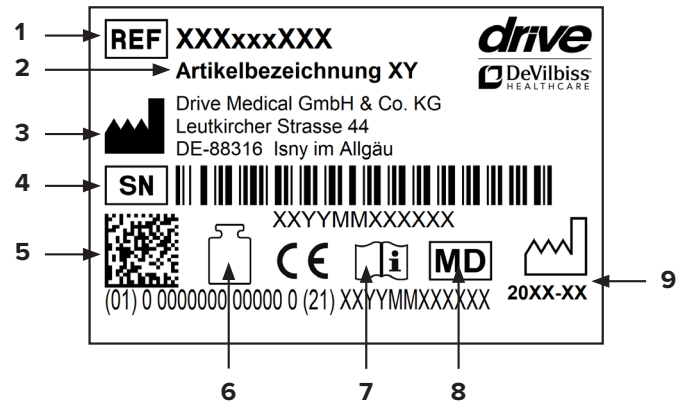

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

Onderdelen van het product



NITRO SL

- | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------|
| 1. Handgreep | 6. Achterwiel | 11. Bowdenkabel |
| 2. Duwgriep | 7. Stuur | 12. Kantelhelpmiddelen |
| 3. Rem | 8. Stokhouder | 13. Reflector vooraan |
| 4. Vergrendelhendel voor duwgrepen | 9. Tas | 14. Achterreflector |
| 5. Zitting | 10. Rugriem | 15. Zijreflector |

Beoogd doel

Looprekken worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Vierwielige looprekken bestaan uit een buizenframe met vier massieve rubberen wielen. Deze looprekken zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker altijd tussen de contactpunten of wielen beweegt. Deze looprekken zijn voorzien van remsystemen die vanaf de handvatten via Bowdenkabels worden bediend. Deze looprekken kunnen worden opgevouwen om transport te vergemakkelijken, en de handvatten zijn in hoogte verstelbaar.

Indicatie

INDICATIE:

Loophulp voor buiten en binnen ter ondersteuning of verbetering van beperkte mobiliteit. De verstrekking van een loophulp aan een verzekerde moet als doel hebben de beperkte mobiliteit bij de gebruiker te compenseren of toch ten minste te verbeteren (uitbreiding van de actieradius / mobiliteit). Voor personen met beperkingen in de hand-/armfuncties is een speciale afstelling/uitvoering van de grepen of hand-/armsteunen nodig. Voor personen met evenwichtsstoornissen zijn verrijdbare loophulpen mogelijk niet geschikt, dit moet in afzonderlijke gevallen worden getest door te proberen. Eventueel moet een begeleider aanwezig zijn. De rollator mag alleen bij normale, dagelijkse bezigheden gebruikt worden.

CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van de rollator wordt afgeraden bij: waarningsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen, onvermogen om te zitten

Geleverd product

1 x	Rollator
1 x	Tas
1 x	Rugriem
1 x	Stokhouder
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de rollator alleen als hulpmiddel bij het lopen.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator niet als stoel in voertuigen zoals bussen of treinen!
- Het is niet toegestaan op de rollator te staan of personen of dieren op de rollator te vervoeren.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik de tas alleen voor transport van voorwerpen

- en belast deze niet te zwaar! Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!
- Maak op hellende wegen gebruik van de bedrijfsrem (trek de remhendel naar boven).
- Als u te zwaar op de handgrepen leunt, kan de rollator naar achter kantelen.
- Bij het uitvouwen / samenvouwen van de rollator kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm de rollator tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.
- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw rollator in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd. Controleer of de remmen goed werken!
- Controleer vóór gebruik van de rollator of de opbouwbeveiliging goed is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven op de rollator en draai deze indien nodig aan!
- De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de wielen afslijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking en de banden.
- De rollator mag NIET aan de zitting, aan afneembare onderdelen of aan de remkabels gedragen worden.
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.
- Om over stoepranden of soortgelijke verhogingen te rijden, dient u de daarvoor bestemde kantelhulp te gebruiken.

Montage

- Haal alle onderdelen uit de doos.
- Vouw het frame open.

Bevestig de zwenkwielen, waarbij u ervoor zorgt dat de wielvorken naar buiten zijn gericht wanneer de rollator in beweging is.

- Label "R" = rechterzijde
- Label "L" = linkerzijde

Let op: Controleer of de twee bevestigingsknoppen volledig en correct zijn vastgedraaid.


Zet het frame en plaats de achterwielen. Leid de achterwielen naar binnen door het klapmechanisme, zodat de bowdenkabels niet aan de buitenkant van het frame lopen.

Als het remkussen contact maakt met het wiel, moeten de onderdelen weer worden losgemaakt en de kabel losser worden gemaakt. Pas de kabel aan met de schroef op de basis en/of aan de kant van het handvat.

Openvouwen

Plaats de rollator op de wielen. Druk nu de beiden zijstangen van de zitting omlaag totdat deze vastklikken **(afb. 1)**.

De rollator is goed opengevouwen als de beide vergrendelhaken zijn vastgeklikt **(afb. 2)**.

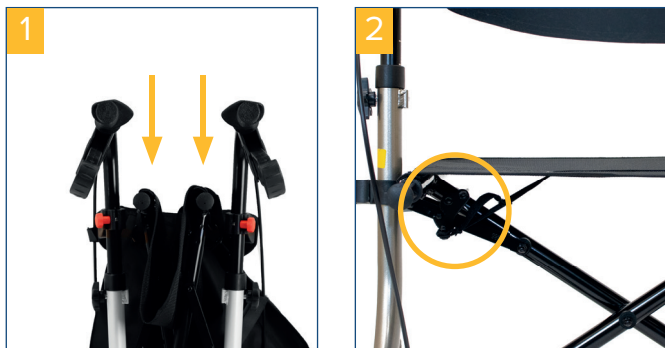

Als het moeilijk is om de stoel bij het uitklappen vast te zetten, kan dit worden verholpen door een klein laagje vet op de vergrendelhaken aan te brengen.

Montage accessoires



De tas wordt met de ogen aan de uiteinden van de framebuis gehangen **(afb. 3)**.

Hoogteverstelling duwgrepen

Steek de duwgrepen minstens tot de eerste doorboring in de buis van het frame. Steek de borgschroef vanaf de binnenkant erdoor en schroef deze vast met de ring en de stervormige knop **(afb. 4)**.


Als u de hoogte van de duwgrepen wilt verstellen, draait u de stervormige knop linksom om de borgschroef los te maken. Zet de greep vervolgens op de gewenste hoogte vast zoals hierboven is beschreven **(afb. 5)**.



Rem instellen

Als de rem slecht of juist te krachtig werkt, kan de rem ofwel boven aan de remhouder **(afb. 6)** of aan de stelschroef onder aan de bowdenkabel **(afb. 7)** op de gewenste remwerking worden ingesteld.

De rem is correct ingesteld als de remhendels en de remkabels geen speling hebben en de wielen bij een losgezette rem zonder sleepgeluiden gedraaid kunnen worden.

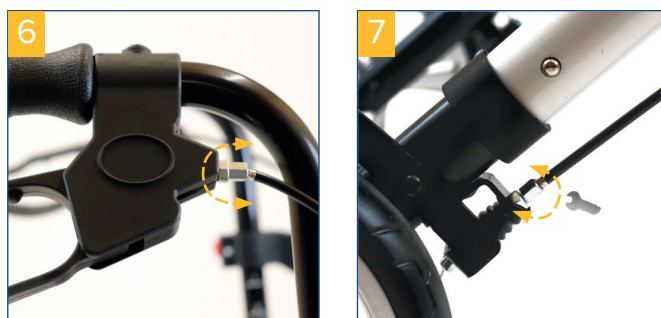

Remmen / parkeren



Als u tijdens het lopen met de rollator wilt remmen, trekt u beide remgrepen met de handen omhoog **(afb. 8)**. Rem altijd langzaam en gelijkmatig met beide handen.



Als u de rollator wilt vastzetten/parkeren, drukt u beide remgrepen omlaag totdat deze hoorbaar vastklikken **(afb. 9)**! U ontgrendelt de remmen door de beide remgrepen weer omhoog te trekken totdat deze zijn ontgrendeld (de remgrepen staan in de middelste stand).

De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de banden afslijten. Controleer daarom regelmatig of de rollator goed remt.

Rugleuningverstelling




Plaats de rugleuning door de bevestigingen aan beide zijden in de geleiders op de beugels te plaatsen. Deze bevinden zich ter hoogte van de handvatten (afb. 10).

Stel de bevestigingen af op de gewenste hoogte.

Let op: Controleer voor ieder gebruik of de rugleuning correct is aangebracht en of de twee bevestigingen volledig zijn vastgedraaid. Controleer of u de rugleuning op de juiste wijze hebt geplaatst (stiksels naar buiten).

Stokhouder

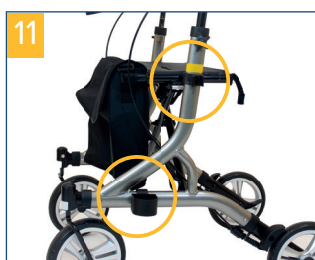

Klem de bovenste stokhouder onder de gele reflector op het frame. Bevestig de onderste stokhouder aan het onderste frame (afb. 11). Controleer of alles goed vast zit. Montage is links of rechts mogelijk.

Zitten

Plaats de rollator op een vlakke, stevige ondergrond. Vergrendel vervolgens de remmen. De rollator moet stabiel staan en mag niet wegglijden. Blijf rechtop zitten, leun niet naar achteren (afb. 12)!

Alleen zitten zoals in de afbeelding, met uw rug naar de looprichting, is toegestaan (afb. 13)!



Kantelhilpmiddelen


Om over stoepranden of soortgelijke verhogingen te komen, gebruikt u de daarvoor bestemde kantelhulp. Zorg ervoor dat u stevig staat wanneer u deze gebruikt. Druk met de punt van uw voet op de kantelhulp zodat de voorwielen van de rollator omhoog komen en de rollator over de verhoging duwt. Verwijder uw voet van de kantelhulp zodra u het obstakel heeft overwonnen.

Let op: Uw evenwicht kan worden beïnvloed bij het gebruik van de kantelhulp!

Samenvouwen | transporteren | opbergen

Um den Rollator zusammenzufalten, ziehen Sie die Sitzfläche am Griff nach oben und falten den Rollator seitlich zusammen (Bild 14-15).

Verwijder accessoires indien van toepassing!

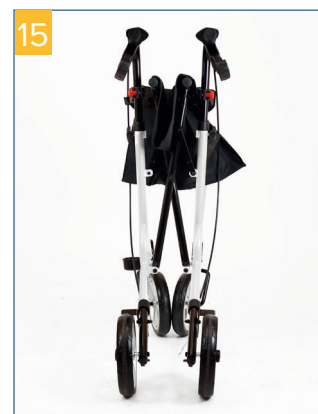

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60° C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna etc.)!
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht!
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.
- Voor de vervaardiging van het product zijn corrosiebestendige materialen gebruikt. Indien desondanks schade in verband met corrosie wordt geconstateerd, mag de rollator niet meer worden gebruikt en moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de gespecialiseerde dealer.

Technische gegevens

Product	NITRO SL Daytona-grijs metaal	NITRO SL wit
Artikelnummer	700300100	700300200
Aanbevolen lichaamsgrootte	1,65 - 1,80 m	1,65 - 1,80 m
Draaicirkel	87 cm	87 cm
Totale lengte x Totale breedte	72 cm x 64 cm	72 cm x 64 cm
handvat hoogte	83 - 93 cm	83 - 93 cm
Greephoogte	46 cm x 20 cm	46 cm x 20 cm
Zithoogte	57 cm	57 cm
Breedte tussen handgrepen	50 cm	50 cm
Afmetingen samengevouwen LxBxH	72 cm x 27 cm x 83 cm	72 cm x 27 cm x 83 cm
Diameter wielen	8" / ca. 203,20 mm	8" / ca. 203,20 mm
Gewicht zonder accessoires	5,5 kg	5,5 kg
Gewicht met accessoires	6,1 kg	6,1 kg
Max. belasting	136 kg	136 kg
Max. belasting van de tas	5 kg	5 kg
Materiaal wielen	PU	PU
materiaal zitting	Nylon	Nylon
Materiaal handgrepen	PVC plastic	PVC plastic
Framemateriaal	Aluminium, corrosiebestendig, poedercoating	Aluminium, corrosiebestendig, poedercoating