

BENNY / BENNY XL



Inhoudsopgave

Voorwoord	15
Verklaring van overeenstemming	15
Levensduur	15
Verwijdering	15
Typeplaatje	15
Hergebruik.....	15
Garantie	15
Onderdelen van het product.....	16
Beoogd doel	16
Indicatie	16
Geleverd product.....	16
Veiligheidsinstructies	16
Montage	17
In de badkuip	17
Reiniging onderhoud	17
Technische gegevens.....	17

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje



1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar/maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u op www.drivedevilbiss.de of bij uw speciaalzaak.

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.


Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): rubberen voetjes

Onderdelen van het product

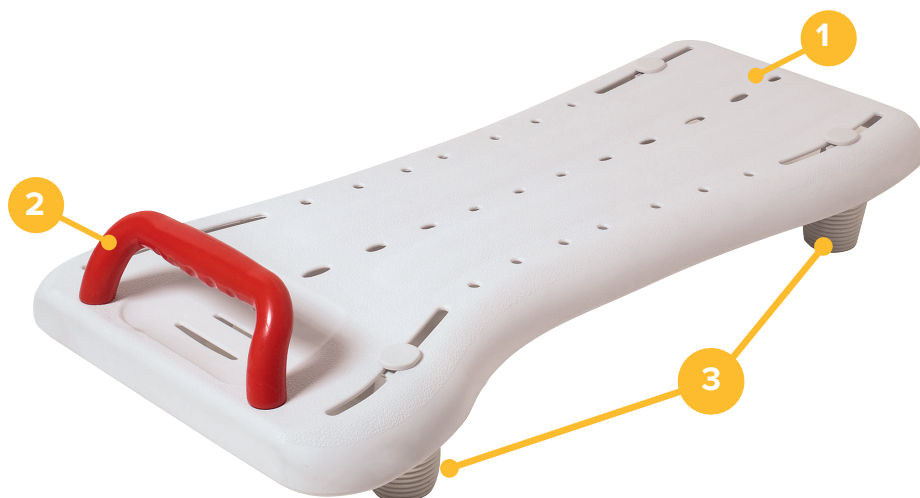

BENNY / BENNY XL

1. **Badplank**
2. **Handgreep**
3. **Aanslagbout**

Beoogd doel

De zijflappen worden over de rand van het bad geplaatst. Hierdoor wordt de afstand die met eigen kracht overbrugd moet worden om in of uit het bad te komen, kleiner. Ze worden gebruikt wanneer er sprake is van aanzienlijke functionele beperkingen van armen en/of benen. Met dit hulpmiddel kunnen mensen weer grotendeels zelfstandig in bad gaan. Om dit hulpmiddel te kunnen gebruiken, moet de cliënt wel over voldoende functionaliteit in het lichaam en de ledematen beschikken om van positie te kunnen veranderen.


Indicatie

INDICATION :

Incapacité de s'asseoir ou de rester assis en position stable dans la baignoire due à une lésion fonctionnelle des membres inférieurs avec mobilité et tonus musculaires réduits ou nuls, sans diminution de la stabilité posturale du tronc, les capacités fonctionnelles des membres supérieurs restant suffisantes.

Geleverd product

1 x A	Ziteenheid
4 x B	Aanslagbout
1 x C	Handgreep
1 x	Gebruiksaanwijzing

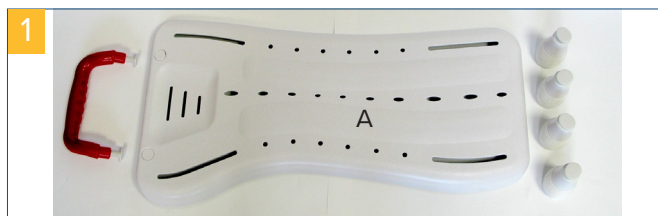

Veiligheidsinstructies


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig.
- Controleer vóór ingebruikname of alle onderdelen stevig vastzitten en niet zijn beschadigd. Gebruik het product niet als het defect is!
- Ga bij het gaan zitten langzaam en gelijkmatig te werk. Laat u zich niet vallen!
- Voorzichtig - gevaar voor uitglijden/vallen!

- Ga niet op de badplank staan.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.

Montage


Handgreep

Verwijder eventueel de beide kunststof schroeven van de handgreep. Steek deze vanaf de onderkant in de daarvoor bedoelde openingen in de badplank. De witte afdekkingen voor de gaatjes vallen er dan aan de bovenkant uit. Steek de handgreep vanaf de bovenkant - naar binnen gericht (afb. 2) - in de daarvoor bedoelde openingen in de badplank en schroef de bevestigingschroeven aan de onderkant (bijv. met een muntje) stevig vast om de handgreep te bevestigen (afb. 3).

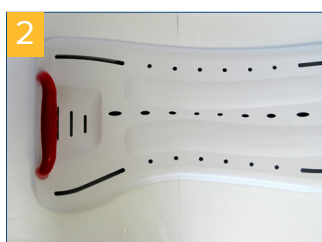

Aanslagbouten

Draai eventueel de plastic schroeven aan de bovenkant uit de aanslagbouten. Steek door iedere gleuf op de badplank een schroef van boven naar onderen, plaats er aan de onderkant een rubberen ring op (afb. 4+5) en schroef de aanslagbouten aan de onderkant een beetje vast (afb. 6).

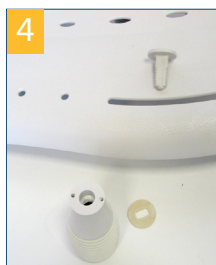

Draai ze nog niet stevig vast, zodat de aanslagbouten later met de gleuven ingesteld kunnen worden op de breedte van de badkuip.

In de badkuip

Leg de badplank dwars op de randen van de badkuip. De greep moet op de wand gericht zijn. De badplank moet zowel links als rechts goed op de rand liggen. Schuif de aanslagbouten in de gleuf helemaal naar de buitenkant tegen de badrand zodat de plank wordt vastgezet. Draai de schroeven nu weer vast (afb. 7).



Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de specialzaak waar u dit product hebt gekocht.

Technische gegevens

Product	Benny 68 cm	Benny 73 cm
Artikelnummer	550100100	550100200
HMV-nr.	04.40.02.0017	04.40.02.0016

Technische gegevens		
Totale breedte	35 cm	35 cm
Totale lengte	68 cm	73 cm
Verstelbereik (binnenbreedte badkuip)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Totaal gewicht	2,1 kg	2,6 kg
Max. belasting	150 kg	150 kg

Product	Benny XL 68 cm	Benny XL 73 cm
Artikelnummer	550100300	550100400

Technische gegevens		
Totale breedte	35 cm	35 cm
Totale lengte	68 cm	73 cm
Verstelbereik (binnenbreedte badkuip)	40 - 63 cm	43 - 68 cm
Totaal gewicht	2,2 kg	2,7 kg
Max. belasting	225 kg	210 kg