

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

DIAMOND DELUXE



Gebrauchsanweisung - Instructions for use - Mode d'emploi - Gebruiksaanwijzing -
Istruzioni per l'uso - Navodila za uporabo

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	24
Verklaring van overeenstemming.....	24
Levensduur.....	24
Verwijdering.....	24
Typeplaatje.....	24
Hergebruik.....	24
Garantie.....	24
Onderdelen van het product.....	25
Beoogd doel.....	26
Indicatie.....	26
Geleverd product.....	26
Veiligheidsinstructies.....	26
Montage.....	27
Rem instellen.....	28
Remmen / parkeren.....	28
Rugleuning instellen.....	28
Samenvouwen transporteren opbergen.....	28
Reiniging onderhoud.....	29
Technische gegevens.....	29

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje

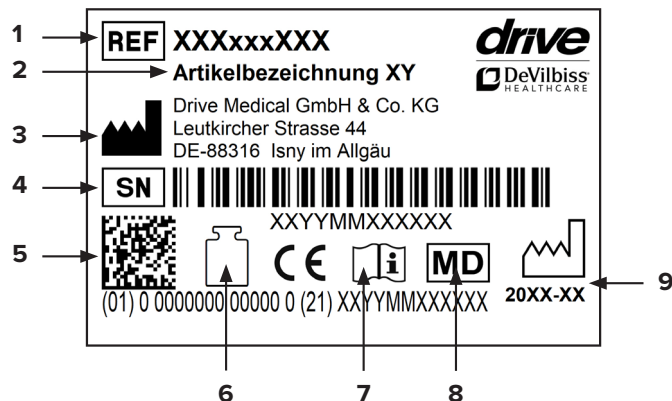

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere):
wielen, remmen en handgrepen

Onderdelen van het product



DIAMOND DELUXE

- 1. Rugsteun
- 2. Duwgriep in hoogte verstelbaar
- 3. Rem
- 4. Zitting

- 5. Achterwiel
- 6. Stelchroef voor achterwiel
- 7. Stokhouder
- 8. Voorwiel

- 9. Tas
- 10. Voetensteun

Beoogd doel

Looprekken worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Vierwielige looprekken bestaan uit een buizenframe met vier massieve rubberen wielen. Deze looprekken zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker altijd tussen de contactpunten of wielen beweegt. Deze looprekken zijn voorzien van remsystemen die vanaf de handvatten via Bowdenkabels worden bediend. Sommige producten zijn voorzien van accessoire of mandjes waarin artikelen kunnen worden meegenomen. Deze looprekken kunnen worden opgevouwen om transport te vergemakkelijken, en de handvatten zijn in hoogte verstelbaar.

Indicatie

INDICATIE:

Loophulp voor buiten en binnen ter ondersteuning of verbetering van beperkte mobiliteit. De verstreking van een loophulp aan een verzekerde moet als doel hebben de beperkte mobiliteit bij de gebruiker te compenseren of toch ten minste te verbeteren (uitbreiding van de actieradius / mobiliteit). Voor personen met beperkingen in de hand-/armfuncties is een speciale afstelling/uitvoering van de grepen of hand-/armsteunen nodig. Voor personen met evenwichtsstoornissen zijn verrijdbare loophulpen mogelijk niet geschikt, dit moet in afzonderlijke gevallen worden getest door te proberen. Eventueel moet een begeleider aanwezig zijn. De rollator mag alleen bij normale, dagelijkse bezigheden gebruikt worden.

CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van de rollator wordt afgeraden bij: waarschingsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen, onvermogen om te zitten.

Geleverd product



1 x	Rollator
1 x	Mand
1 x	Rugsteun
1 x	Stokhouder
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies


- Gebruik de rollator alleen als hulpmiddel bij het lopen!
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Gebruik de rollator niet als stoel in voertuigen zoals bussen of treinen!
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!
- Maak op hellende wegen gebruik van de bedrijfsrem (trek de remhendels naar boven).
- Als u te zwaar op de handgrepen leunt, kan de rollator naar achteren kantelen.
- Bij het uitvouwen / samenvouwen van de rollator kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm de rollator tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.
- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw rollator in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd. Controleer of de remmen goed werken!
- Controleer voor gebruik van de rollator of de opvouwbeveiliging goed is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven op de rollator en draai deze indien nodig aan!“
- De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de banden afslijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking en de banden.
- De rollator mag NIET aan de zitting, aan afneembare onderdelen of aan de remkabels gedragen worden.
- Gebruik de voetsteunen nooit als hulp bij het opstaan – dit leidt tot gevaar voor omvallen!
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Montage


Leg de losse onderdelen klaar zoals te zien is in **afb. 1**. Steek de achterwielen in de bevestigingsbuizen (**afb. 2**) en borg ze met de borgschroeven (**afb. 3**)

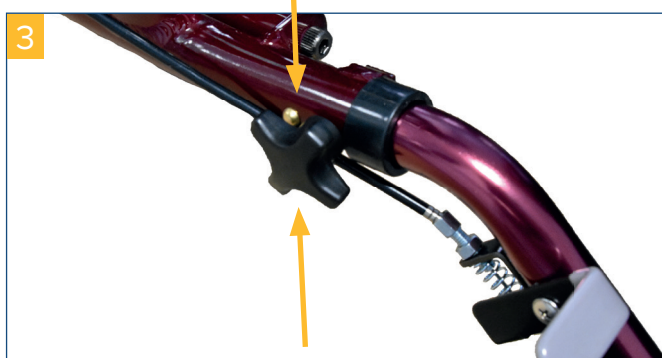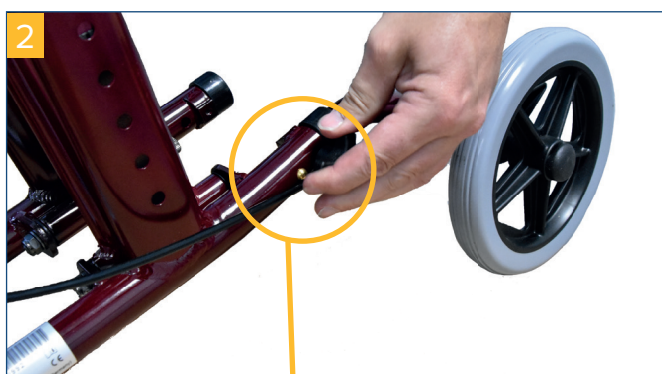




Druk de voorwielen krachtig in de houders tot ze vastklikken (**afb. 4**). Als u het wiel wilt losmaken, drukt u op de rode knop en trekt u het wiel eruit (**afb. 5**).

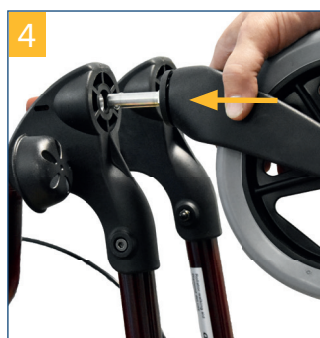

Zet nu de rollator (**afb. 6**) op de wielen (**afb. 7**) en druk van boven naar de zijkant toe op de zitting tot deze hoor- en voelbaar vastklikt (**afb. 8**).

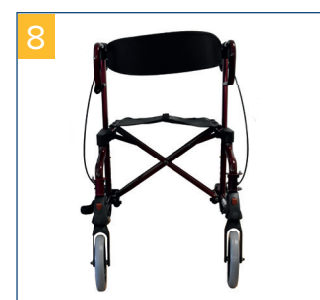

Om de hoogte van de grepen in te stellen, drukt u beide clips in en verschuift u de geleidebuis in de gewenste stand (**afb. 9**). Hang de voetsteunen er zodanig in dat ze vastklikken in de twee bouten (**afb. 10-11**). Om ze weg te zwenken zet u de vergrendeling los zoals te zien is in **afb. 12**.

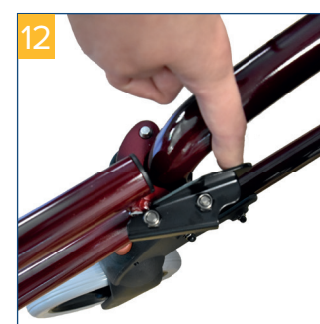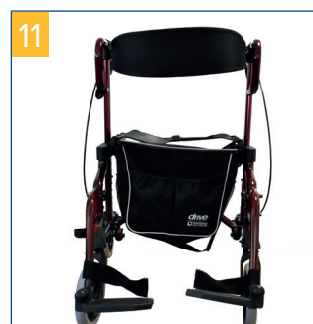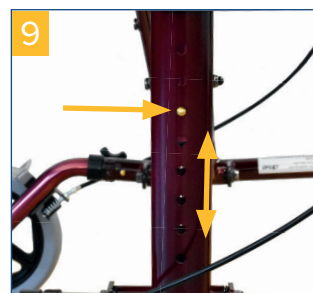

Als u de voetsteunen niet gebruikt, hangt u ze er zoals te zien in **afb. 13** zodanig in dat alle 3 bouten zijn vastgeklikt, de voetsteunen zijn dan vast vergrendeld aan de rollator (**afb. 14**).




Rugleuning instellen

Om de rugleuning in te stellen in de betreffende gebruikerspositie, opent u de rode vergrendelingshendel aan beide zijden (afb. 19), zwenkt u de rugleuning in de gewenste positie en sluit u de vergrendelingen weer.



Rem instellen



Als de rem slecht of juist te krachtig werkt, kan de rem ofwel boven aan de remhouder (afb. 15) of aan de stelschroef onder aan de bowdenkabel (afb. 16) op de gewenste remwerking worden ingesteld.

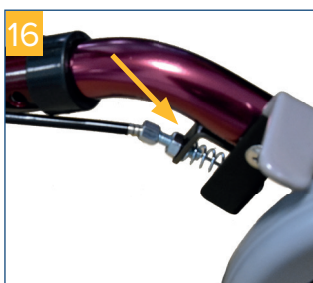

Zorg dat de vergrendeling goed is vastgeklikt.

Samenvouwen | transporteren | opbergen

Als u de rollator wilt samenvouwen, trekt u de zitting en de rollator omhoog. Kantel de rollator tegen de looprichting in omlaag naar achteren. Het frame wordt dan ingevouwen (afb. 20-22).

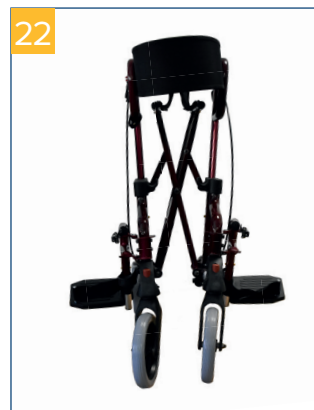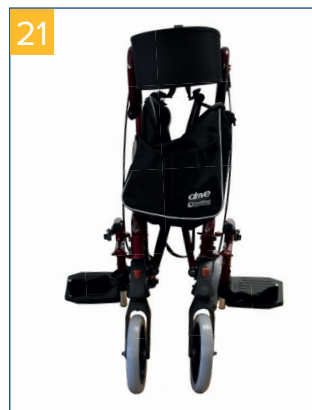

De rem is correct ingesteld als de remhendels en de remkabels geen speling hebben en de wielen bij een losgezette rem zonder sleepgeluiden gedraaid kunnen worden.

Remmen / parkeren

Als u tijdens het lopen met de rollator wilt remmen, trekt u beide remgrepen met de handen omhoog (afb. 17). Rem altijd langzaam en gelijkmatig met beide handen.

Als u de rollator wilt vastzetten/parkeren, drukt u beide remgrepen omlaag totdat deze hoorbaar vastklikken (afb. 18)! U ontgrendelt de remmen door de beide remgrepen weer omhoog te trekken totdat deze zijn ontgrendeld (de remgrepen staan in de middelste stand).



Verwijder accessoires indien van toepassing!

De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de banden afslijten. Controleer daarom regelmatig of de rollator goed remt.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60° C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna etc.)!
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht!
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

Technische gegevens

Product	DIAMOND DELUXE
Artikelnummer	745R
Totale lengte x Totale breedte	104,2 cm x 64 cm
Greephoogte	77 - 94,5 cm
Breedte zitting x Diepte zitting	40 cm x 19 cm
Zithoogte	54 cm
Breedte tussen handgrepen	46 cm
Afmetingen samengevouwen	63 x 28 x 100 cm
Gewicht	10,3 kg
Max. belasting	136 kg
Framemateriaal	Aluminium, poedercoating