

TSE 150 / TSE 150 Plus



Inhoudsopgave

Voorwoord.....	21
Verklaring van overeenstemming.....	21
Levensduur.....	21
Verwijdering.....	21
Typeplaatje.....	21
Hergebruik.....	21
Garantie.....	21
Onderdelen van het product.....	22
Beoogd doel.....	22
Indicatie.....	22
Geleverd product.....	23
Veiligheidsinstructies.....	23
Gebruik.....	23
Montage.....	23
Hoogte instellen.....	24
Reiniging onderhoud.....	25
Technische gegevens.....	25

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje

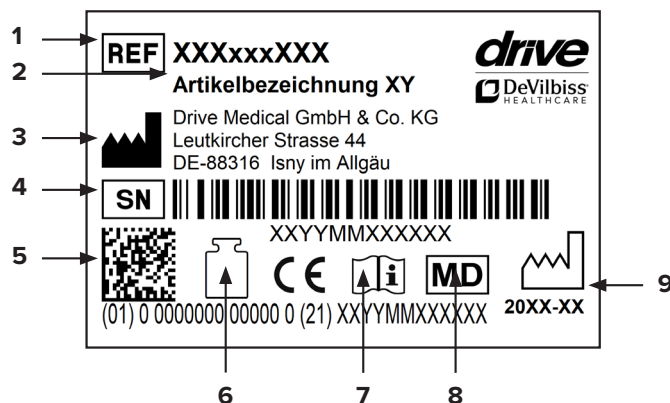

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar/maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u op www.drivedevilbiss.de of bij uw speciaalzaak.





Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

Onderdelen van het product

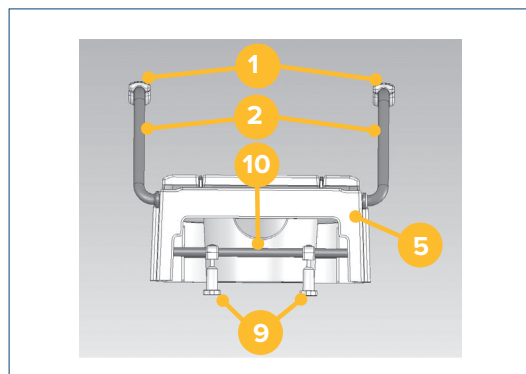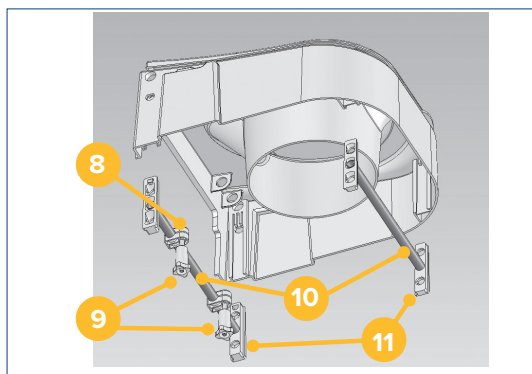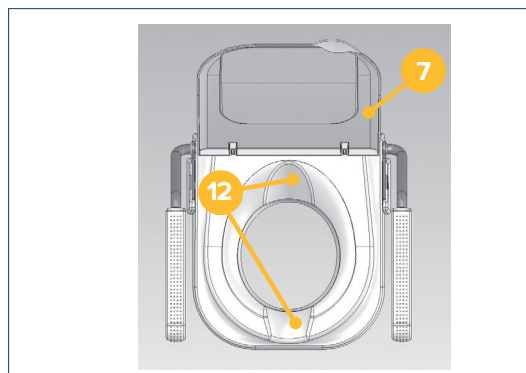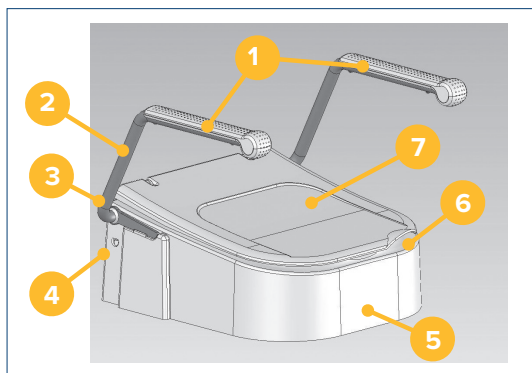

TSE 150

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Armleuningpolstering | 5. Romp | 9. Greepmoeren |
| 2. Armleuning | 6. Greepschaal (in deksel) | 10. Dwarstangen |
| 3. Armleuninghouder | 7. Deksel | 11. Rooster/houders |
| 4. Vergrendeling voor rooster/houder | 8. Klemonderdeel | 12. Hygiëne-uitsparingen |

Beoogd doel

Toiletverhogers worden op de bestaande toiletput geplaatst of hierop vastgeschroefd en worden gebruikt om het toilet te verhogen. Toiletverhogers kunnen met of zonder armsteunen worden gebruikt. Toilethulpmiddelen vergroten de onafhankelijkheid bij gebruik van het toilet en de hieraan gerelateerde persoonlijke hygiëne, met name omdat de beperkte of ontbrekende functies van het motorieke systeem of het gebrek aan spierkracht wordt gecompenseerd.

Indicatie

INDICATIE:

Bemoedigt toiletgebruik vanwege onaangepaste zit-hoogte door beperkt vermogen tot gaan zitten en opstaan bij tegelijkertijd beperkte controle over de romp bij functiestoornis van de onderste extremiteit met aanzienlijk beperkte of volledig ontbrekende beweeglijkheid van de gewrichten en/of beperkingen van de spierkracht in de onderste extremiteit en/of beschadiging van LWK, heup en/of kniegewricht en/of beschadiging van het zenuwstelsel/centrale zenuwstelsel en/of beschadiging van de spierfunctie met beperkte of ontbrekende rompstabiliteit.

CONTRA-INDICATIES:

De toiletverhoger dient uitsluitend te worden gebruikt om de hoogte van een toilet te verhogen en is daarom zodanig ontworpen dat hij op een toiletput past. Elk ander gebruik dan het aangegeven gebruik is niet toegestaan. De toiletverhoger is ontworpen uitsluitend voor gebruik door volwassenen. Gebruik hem niet als toiletzitting voor kinderen. Wanneer juist gebruikt, zijn er geen contra-indicaties.

Geleverd product

1 x A	Romp
1 x B	Dwarsstangen achter
4 x C	Rooster/houder
1 x D	Dwarsstangen vooraan
2 x E	ArMLEuning (alleen Artikel 5201000)
2 x F	Handvatmoer
2 x G	Draadstang M8
2 x H	Stervormige schroef (alleen TSE 150 Plus)
2 x I	Topmontage-plug (alleen TSE 150 Plus)
1 x	Gebruiksaanwijzing
1 x	Vinyl handschoenen

Veiligheidsinstructies

- Niet gebruiken bij een defect!
- Voorzichtig – gevaar voor uitglijden/vallen!
- De deksel mag in geopende stand niet als rugleuning worden gebruikt!
- De deksel mag in gesloten stand niet worden belast (bijvoorbeeld door erop te zitten)!
- Controleer regelmatig of de toiletverhoger goed vastzit op de toiletpot. Draai indien nodig de greepmoeren aan.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Gebruik

De toiletverhoger TSE 150 is geschikt voor vrijwel alle standaard / in de handel gebruikelijke toiletputten.


Montage

Verwijder de bril en deksel van de toiletput. Voor de montage is geen gereedschap nodig.

TSE 150

Plaats de toiletverhoger op de WC-pot, verwijder de greepmoeren (**F**), stel de beide M8-draadstangen (**G**) in op de juiste breedte en voer ze door de booropening in de WC-pot. Afhankelijk van de lengte van de toiletput moet erop worden gelet dat de klemonderdelen aan de achterste dwarsstang (**B**) in juiste richting zijn geplaatst, zodat de beide dwarsstangen goed steunen. Draai de beide greepmoeren (**F**) weer handvast op de draadstan-


gen (**G**), lijn de toiletverhoger uit en draai daarna de beide greepmoeren (**F**) stevig vast. Controleer of alle schroeven goed vastzitten en haal ze eventueel aan. Voor de montage mag alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal worden gebruikt.

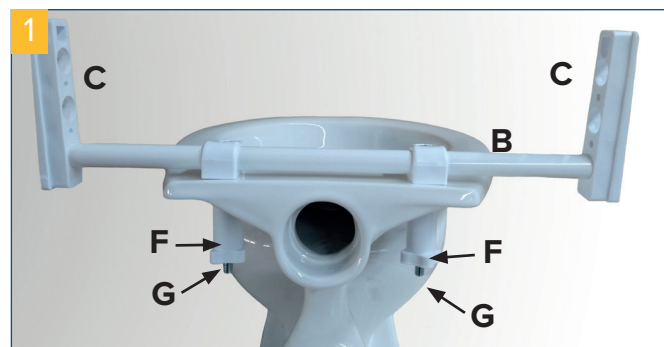

TSE 150 PLUS:

Druk de topmontage-pluggen (**I**) zoals op de afbeelding te zien is in elkaar en steek ze van boven in de bevestigingsgaten van het keramiek (**afbeelding 2**).

Leg de steun achter (**B**) op het keramiek en draai de stervormige schroeven (**H**) er van boven op, maar draai ze nog niet vast. Lijn de steun achter (**B**) uit met het midden van het keramiek en draai de stervormige schroeven (**H**) stevig vast (**afbeelding 3+4**).

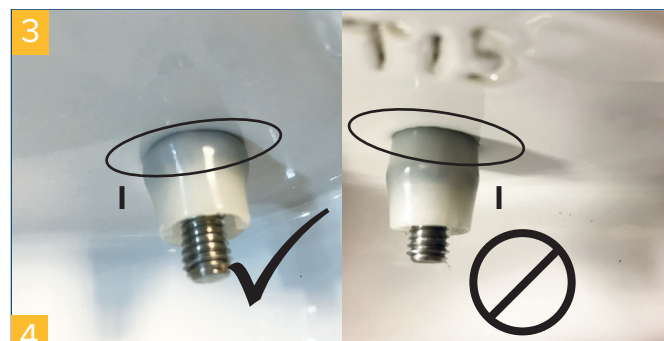

Steek de roosters/houders (**C**) op de gewenste hoogte (6,5 / 10 / 13,5 cm) rechts en links op de steun achter (**B**) (**afbeelding 4**).

Steek de roosters/houders (C) op de gewenste hoogte (6,5 / 10 / 13,5 cm) rechts en links op de steun achter (D).

Let erop dat de voorste steunen (D) rechts en links op dezelfde hoogte worden ingestoken.

De voorste steunen (D) kunnen lager worden ingesteld dan de achterste steun (B).


Steek de romp van de toiletverhoger (A) in de roosters/houders (C). De roosters/houders (C) moeten daarbij vastklikken met de vergrendelklampen (L) in de romp (A).

De roosters/houders (C) kunnen slechts in één richting in de toiletverhoger worden gestoken.

MONTAGE DECKEL:

Bij de levering is de deksel voormonteerd, maar indien nodig kan deze worden vervangen. De deksel kan indien nodig heel gemakkelijk worden vervangen. Klap de deksel daartoe helemaal naar achteren.

De deksel kan vervolgens uit de houders naar achteren eruit worden gehaald. Steek de nieuwe deksel er op dezelfde manier in (afb. 6).

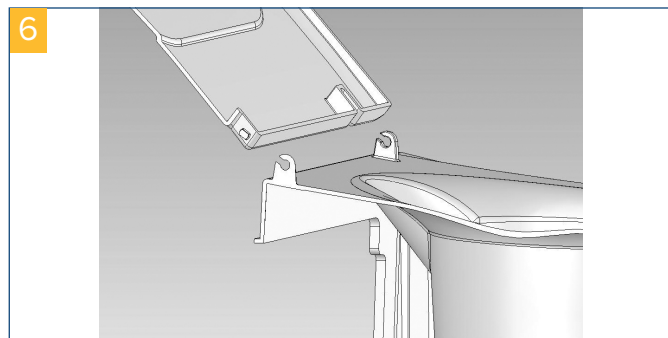



MONTAGE ARMLEUNINGEN:

Steek de armleuningen zijdelings in de daarvoor bestemde armleuninghouders.


Schuif de armleuningen (E) vervolgens tot de aanslag naar binnen en klap ze daarna omlaag.

Hoogte instellen

De toiletverhoger kan met het rooster naar keuze worden ingesteld op een verhoging van 6,5 cm, 10 cm of 13,5 cm (afb. 7+8).

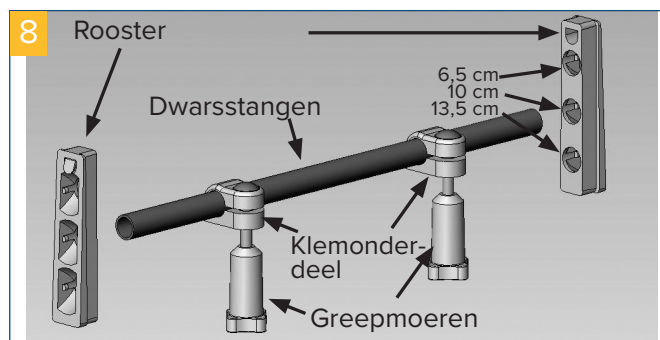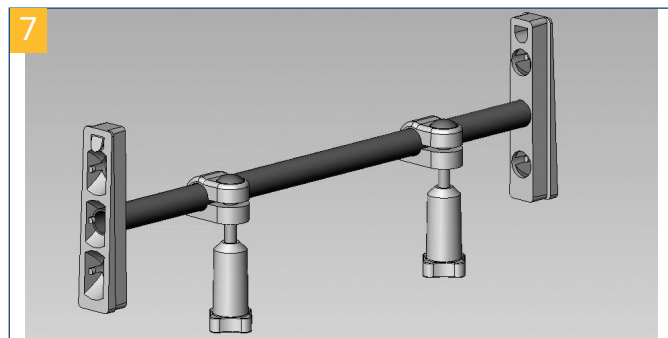


Bij levering is de verhoger ingesteld op 10 cm (afb. 9).

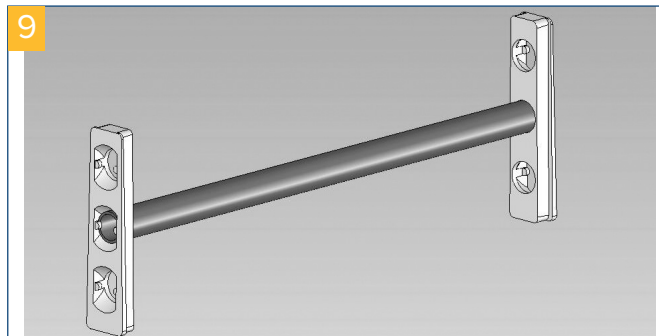

Als u dit wilt veranderen, doet u het volgende:

- Druk de vergrendelklampen rechts en links onder de armleuninghouders een beetje in en trek daarbij de achterste dwarsstang met de roosters/de houders naar buiten. Verwijder ook de voorste dwarsstang met de roosters.
- Stel voor en achter de gewenste hoogte in (afb. 10).

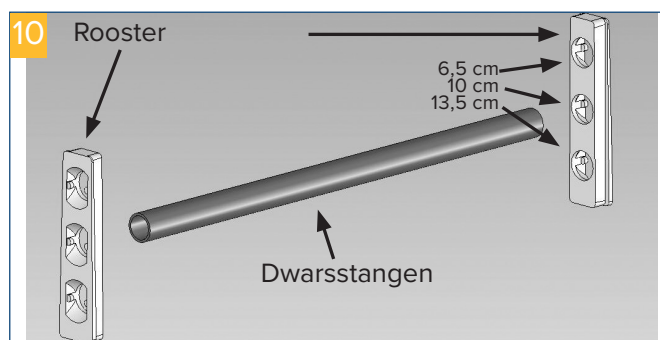

- Steek daarvoor de dwarsstangen in de bijbehorende opening in het rooster.
- Let erop dat de dwarsstangen rechts en links op dezelfde hoogte worden ingesteld.
- De voorste dwarsstang kan lager worden ingesteld dan de achterste dwarsstang.
- Steek de voorste en achterste dwarsstangen met de houders weer in de toiletverhoger. De houders van de achterste dwarsstang moeten daarbij met de vergrendelklampen vastklikken.

De roosters/houders kunnen slechts in één richting in de toiletverhoger worden gestoken.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60° C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht.

Technische gegevens

Produkt	TSE 150		TSE 150 Plus
	zonder armleuning	met armleuning	met armleuning
Artikelnummer	5200500	5201000	520150000
HMV-nr.	33.40.01.1013	33.40.01.3023	33.40.01.3037
Totale breedte	46 cm	56 cm	56 cm
Totale lengte	48,5 cm		48,5 cm
Totale hoogte	22,5 cm	41 cm	41 cm
Hoogteverstelling	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm
Breedte tussen de armleuning	-	48 cm	48 cm
Opening lengte	25 cm		25 cm
Opening breedte	23 cm		23 cm
Gewicht	3,7 kg	5,7 kg	5,7 kg
Max. belasting	150 kg		150 kg
Material	Plastik (PP)		Plastik (PP)