

ROOMBA



Inhalt

Voorwoord.....	21
Verklaring van overeenstemming.....	21
Levensduur.....	21
Verwijdering.....	21
Typeplaatje.....	21
Hergebruik.....	21
Garantie.....	21
Onderdelen van het product.....	22
Beoogd doel.....	23
Indikation.....	23
Geleverd product.....	23
Veiligheidsinstructies.....	23
Openvouwen.....	23
Inklappen.....	24
Gebruik van het dienblad.....	24
Hoogteverstelling handgreep.....	24
Remmen parkeren.....	25
Controle van de wielenr.....	25
Reiniging onderhoud.....	25
Technische gegevens.....	25

Voorwoord

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van het merk Drive DeVilbiss.

Het ontwerp, de functionaliteit en de kwaliteit van dit product zullen u niet teleurstellen.

Lees deze bedieningshandleiding voor het eerste gebruik aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips voor verantwoord gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw Drive DeVilbiss-speciaalzaak die u het product heeft geleverd.

Deze bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie voor aanpassing en bediening. U kunt de meest recente bedieningshandleiding online als PDF opvragen of bij de klantenservice bestellen.

Daarbij zijn extra grote formaten beschikbaar voor wie visueel gehandicapt is. Blinde patiënten moeten door hun begeleider worden geïnstrueerd. Voor reparaties en enkele instellingen is een speciale technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG verklaart dat het beschreven product voldoet aan de verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een levensduur van vijf jaar, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en serviceaanwijzingen worden gevolgd.


Deze levensduur kan aanzienlijk worden verlengd wanneer het product zorgvuldig wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt en de technische grenzen volgens de ontwikkelingen in wetenschap en techniek niet worden overschreden.

Door extreem gebruik en oneigenlijke toepassing kan de levensduur echter ook sterk worden verkort. De aanduiding van de levensduur door onze onderneming vormt geen aanvullende garantie.

Verwijdering

Mocht u het product niet meer nodig hebben, neem dan contact op met uw speciaalzaak of breng het product naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt.

Typeplaatje

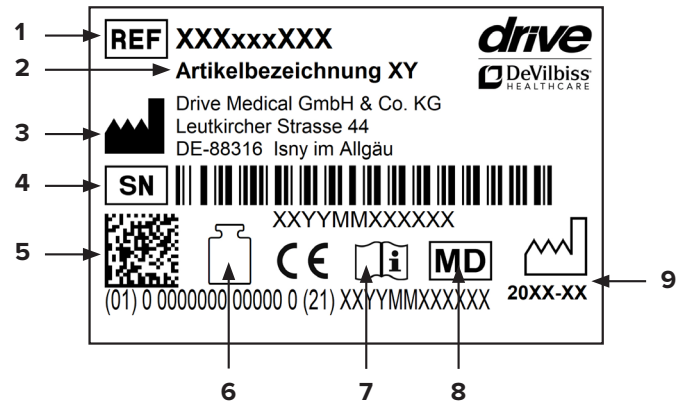

1 Artikelnummer | 2 Artikelomschrijving | 3 Fabrikant | 4 Serienummer | 5 UDI-code | 6 Max. belasting | 7 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | 8 Medisch product | 9 Productiedatum (jaar-maand)

Hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik.

Denk eraan dat u ook alle technische documentatie die nodig is voor een veilig gebruik, overhandigt aan de nieuwe gebruiker.

Het product moet door de speciaalzaak gecontroleerd, gereinigd en voor hergebruik in een perfecte staat gebracht worden.

Bij de voorbereiding voor hergebruik dient de informatie van de producent in acht te worden genomen. Deze informatie wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Verkrijgbare accessoires vindt u bij uw speciaalzaak of op www.drivedevilbiss.de

Garantie

Op het product dat wij leveren, wordt 24 maanden garantie vanaf de koopdatum verleend. Indien aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout optreedt, worden beschadigde onderdelen kosteloos vervangen.

Slijtageonderdelen worden in het algemeen tijdens de normale garantieperiode niet gedekt, tenzij een reparatie of vervanging van de artikelen nodig is die onbetwistbaar een direct gevolg is van een fabricage- of materiaalfout.

Eventuele fouten en wijzigingen op grond van technische verbeteringen en veranderingen in design voorbehouden.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Slijtageonderdelen zijn (onder andere): wielen, remmen en handgrepen

Onderdelen van het product



Roomba

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1. Handgreep | 6. Voorwiel | 11. Dienbladvergrendeling |
| 2. Parkeerrem | 7. Bowdenkabel | 12. Clip voor hoogteverstelling |
| 3. Rembeugel | 8. Achterwiel | |
| 4. Dienblad | 9. Rem | |
| 5. Mand | 10. Frame | |

Beoogd doel

Looprekken voor gebruik binnenshuis worden gebruikt om veiliger te kunnen lopen, en kunnen, afhankelijk van het ontwerp, ook worden gebruikt om druk te verlichten. Vierwielige looprekken bestaan uit een buizenframe met vier massieve rubberen wielen. Deze looprekken zijn zodanig ontworpen dat de gebruiker altijd tussen de contactpunten of wielen beweegt. Deze looprekken zijn voorzien van remsystemen die vanaf de handvatten via Bowdenkabels worden bediend. Sommige producten zijn voorzien van accessoires of mandjes waarin artikelen kunnen worden meegenomen.

Indikation

INDICATIE:

Belemmering van de mobiliteit bij aantasting van beweging/coördinatie/evenwicht - maar nog voldoende behoud van loopvermogen, wanneer het gebruik van andere loophulpen niet voldoende is. Behoud/bevordering van het vermogen om veilig te kunnen lopen en staan (looptraining).

CONTRA-INDICATIE:

Gebruik van de rollator wordt afgeraden bij: waarnemingsstoornissen, sterke evenwichtsstoornissen.

Geleverd product

1 x	Rollator
1 x	Mand
1 x	Dienblad
1 x	Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Alleen goedgekeurd voor gebruik binnenshuis!
- Gebruik de rollator alleen als hulpmiddel bij het lopen.
- Gebruik de rollator alleen op een vlakke, stevige ondergrond.
- Het is niet toegestaan op de rollator te staan of personen of dieren op de rollator te vervoeren.
- Let op het toegestane maximale gewicht van de gebruiker. Deze informatie vindt u in de technische gegevens in deze bedieningshandleiding en op het typeplaatje.
- Gebruik het dienblad alleen voor kleine, lichte voorwerpen die niet scherp of warm zijn. Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik de mand alleen voor transport van voorwerpen en belast hem niet te zwaar. Max. belasting: 5,0 kg
- Gebruik op roltrappen e.d. is uitdrukkelijk verboden!
- Hang geen tassen aan de grepen – kantelgevaar!
- Maak op hellende wegen gebruik van de bedrijfsrem

(trek de remhendel naar boven).

- Als u te zwaar op de handgrepen leunt, kan de rollator naar achter kantelen.
- Bij het uitvouwen / samenvouwen van de rollator kunnen kleding en lichaamsdelen bekneld raken.
- Bescherm de rollator tegen zonnestraling. Onderdelen van het product kunnen warm worden en bij aanraking huidletsel veroorzaken.
- Vergewist u zich er voor elk gebruik van dat uw rollator in goede staat verkeert en dat alle verstelbare onderdelen goed zijn bevestigd. Controleer of de remmen goed werken!
- Controleer voor gebruik van de rollator of de opvouwbeveiliging goed is vergrendeld.
- Controleer regelmatig de schroeven op de rollator en draai deze indien nodig aan!
- De remmen kunnen minder goed gaan werken wanneer de wielen afslijten. Controleer daarom regelmatig de remwerking en de banden.
- De rollator mag NIET aan afneembare onderdelen of aan de remkabels gedragen worden.
- Ieder ernstig voorval dat in verband met het product optreedt, moet worden gemeld bij de fabrikant en bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat, waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Openvouwen


Houd het dienblad voor met één hand vast, til de handgreep op en trek het dienblad in de richting zoals aangegeven in **afb. 1**. Het dienblad is helemaal geopend als u een klik hoort.

Om te controleren of het dienblad helemaal geopend is, houdt u de handgreep met één hand vast en drukt u het dienblad met de andere hand in de richting zoals aangegeven in **afb. 1**. De rollator is helemaal opgevouwen voor gebruik als u een klik hoort.



Inklappen

Pak de dienblad-opklapbeugel vast en til deze op zoals aangegeven in **afb. 2**. Het dienblad is nu vrij en kan omlaag geklapt worden.

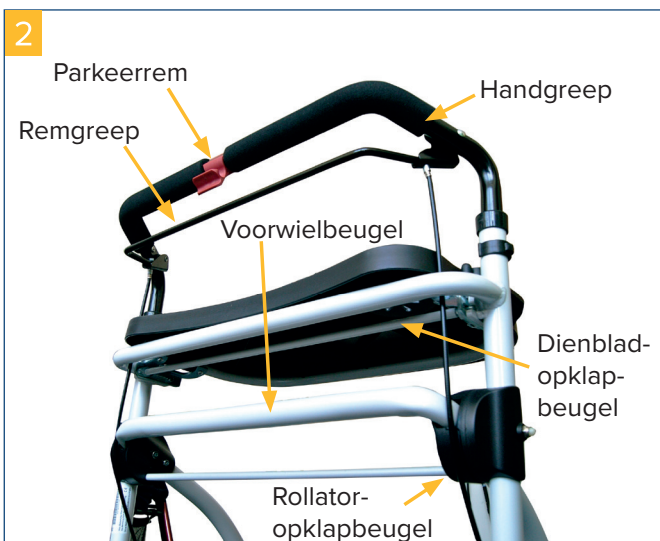

Pak met de ene hand de handgreep vast en pak met de andere hand de voorwielbeugel in het midden vast. Trek vervolgens de rollator-opklapbeugel met uw vingers omhoog. Zodra u deze helemaal omhoog hebt getrokken, vouwt u de rollator in elkaar door de voorwielbeugel omhoog te drukken.

Gebruik van het dienblad

Controleer vóór gebruik of het dienblad correct gemonteerd is. Anders gaat u als volgt te werk om het dienblad te monteren:

Houd het dienblad met beide handen vast aan de dienbladvergrendelingen, zie Onderdelen van de rollator nr. 11, en til deze op tot het dienblad goed ligt. Zodra de hoeken van het dienblad het onderstel op de beugel raken, drukt u de vergrendelingen iets omlaag. Controleer of het dienblad stevig op de houder boven de tas ligt. Controleer of de hoeken van het dienblad het onderstel slechts licht raken, zodat het onderstel niet beschadigd raakt.

Anders kan de functie van het dienblad nadelig worden beïnvloed. Houd het dienblad met beide handen aan de dienbladvergrendelingen vast en til de vergrendeling op de beugel op, om deze te ontgrendelen. Vervolgens neemt u het dienblad er horizontaal uit.

Hoogteverstelling handgreep

Verwijder de borgmoer en trek de handgreep omhoog tot de gewenste hoogte (**afb. 3**).

Breng de borgmoer weer aan, zoals getoond in **afb. 4**.



Remmen | parkeren

Als u wilt remmen, trekt u de remgreep met uw vingers omhoog. Als u de rem wilt vastzetten, pakt u de handgreep met beide handen vast en drukt u op de rode parkeerrem om de rollator vast te zetten.

Als u een klik hoort, is de rollator correct vastgezet. Als u de parkeerrem wilt loszetten, drukt u opnieuw op de rode parkeerrem. Als u een klik hoort, is de rem losgezet.

Controle van de wielen

Reinig de wielen met water of een mild reinigingsmiddel en droog ze af met een schone doek.

Als de wielen piepen, kunt u de wielassen licht oliën met een onderhouds- of verzorgende olie.

Reiniging | onderhoud

- Reinig dit product regelmatig met de hand met een vochtige doek!
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen!
- Gebruik geen schuurmiddelen!
- Gebruik geen reinigingsmiddel met een hoog chloor- en azijngehalte!
- Voor desinfectie kan een desinfecterende spray worden gebruikt, bijvoorbeeld Descosept AF of Bacillol AF.
- Controleer de schroeven regelmatig en draai deze indien nodig aan!
- Het product mag niet langdurig aan temperaturen boven 60°C worden blootgesteld (bijv. gebruik in een sauna, enz.).
- Neem bij defecten contact op met de speciaalzaak waar u dit product hebt gekocht.
- Controleer regelmatig de staat van de banden. Deze zijn 'lekkagevrij', met andere woorden, u hoeft geen bandenspanning te controleren of banden op te pompen. Controleer de banden wel altijd op scheurtjes of andere beschadigingen.

Technische gegevens

Product	ROOMBA
Artikelnummer	730200100
Totale lengte	51,5 cm
Totale breedte	57 cm
Totale hoogte	94,1 cm
Greephoogte	81,4 - 94,1 cm
Breedte tussen de achterwielen	44 cm
Afmetingen samengevouwen	29 x 55 x 83 cm
Gewicht	5,6 kg
Max. belasting	100 kg
Framemateriaal	Aluminium